




## מדריך הפעלה מקוצר - OMRON M3

### כיוון התאריך והשעה :

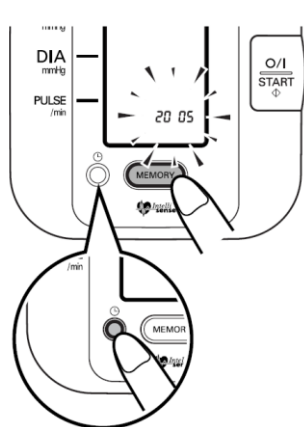

1. בלחיצה הראשונה על הכפתור הקטן שסימנו ⌚ תוצג אופציית הצפצוף במכשיר :  
On – צפצוף פעיל, Off - צפצוף לא פעיל. אופציה זו תגרום לכך שבזמן ירידת האוויר במהלך המדידה ישמע צפצוף המורה על הדופק.
2. לחיצה שנייה על כפתור ⌚ תביא אותנו לכיוון השנה כאשר לחיצות על כפתור memory יעלו את הספרות משנת 2005 ועד שנת 2030. לאישור השנה יש ללחוץ על כפתור ⌚.
3. בלחיצה על כפתור memory נכוון את החודש, לאישור נלחץ על כפתור ⌚.
3. בלחיצה על כפתור memory נכוון את היום בחודש ושוב לאישור נלחץ על ⌚.
4. בלחיצה על כפתור memory נכוון את השעה של היום, לאישור נלחץ על ⌚.
- בלחיצה על כפתור memory נכוון את הדקות ושוב לאישור נלחץ על ⌚. בסיום כיוון השעה יש לכבות המכשיר על הכפתור הכחול.

### הוראות כלליות והפעלה :

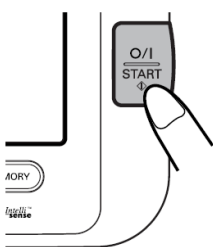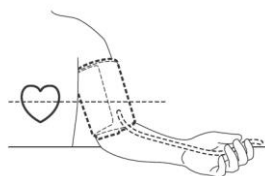

1. יש לבצע את המדידה בישיבה מול שולחן לאחר מנוחה של כ-5 דקות.
2. יש להניח את היד והאמה על השולחן כאשר כף היד מופנית כלפי מעלה.
3. יש להדק את השרוול היטב על זרוע יד שמאל כ-2 ס"מ מעל כיפוף המרפק כאשר הצינורית תצא מאמצע הכיפוף.
4. הדלק את המכשיר על הכפתור הכחול (Start / O/I).
5. המכשיר יתחיל את המדידה אוטומטית עם הלחיצה הראשונית על הכפתור הנ"ל ובסיום המדידה יופיע על הצג תוצאת לחץ דם ססטולי, דיאסטולי, מתחת יופיע הדופק ומתחת לדופק תופיע השעה.
6. יש לבצע שתי מדידות בהפרש של דקה עד שתי דקות בין מדידה למדידה ולהתייחס לתוצאות המדידה השנייה.
7. מטרת המדידה הראשונה הינה הסתגלות למכשיר ולכן אין להתייחס לתוצאות הבדיקה הראשונה (שהיא לרב גבוהה יותר).
8. חשוב לזכור כי בימים הראשונים של השימוש במכשיר תתכן קבלת תוצאות גבוהות מהתוצאות הרגילות. תופעה זו נפוצה ונובעת מעצם השימוש במכשיר החדש.

לתמיכה ושירות ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות OMRON בחברת אגנטק

פתוח בימים א'-ה' 8:00-16:00, ו' 08:00-13:00

קרית עתידים, בנין מס' 2, ת.ד. 58008, תל אביב 61580

טלפון: 03-6446468 • [www.agentek.co.il/sport](http://www.agentek.co.il/sport)