


Omron R2 – הוראות הפעלה

הוראות כלליות והפעלה:


- יש לבצע את המדידה בישיבה לאחר מנוחה של כ-10 דקות.
- יש לכרוך את השרוול סביב שורש כף היד החשוף (שמאל או ימין) כך שהמכשיר יונח בטור לאגודל מתחת לכף היד כאשר הצג מופנה כלפי מעלה עם הפנים למשתמש, במרחק של בין 1 ס"מ ל-1.5 ס"מ משורש כף היד.

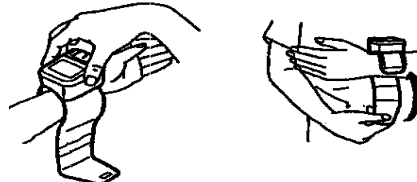

- הנח את כף היד עם המכשיר מתחת לכתף הנגדית ומקם את המכשיר בגובה הלב.



- לחץ על הכפתור הכחול. המכשיר יתחיל את המדידה באופן אוטומטי ובסיום הניפוח יראה את התוצאה.

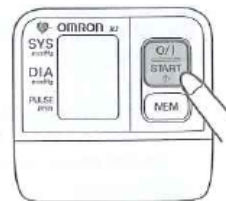

- אין לזוז או לדבר בזמן המדידה.
- יש לבצע 2 מדידות בהפרש בין דקה ל-2 דקות בין מדידה למדידה ולהתייחס לתוצאות המדידה השנייה.
- מטרת המדידה הראשונה הינה הסתגלות למכשיר ולכן אין להתייחס לתוצאות הבדיקה הראשונה (שהיא לרב גבוהה יותר).
- חשוב לזכור כי בימים הראשונים של השימוש במכשיר תתכן קבלת תוצאות גבוהות מהתוצאות הרגילות. תופעה זו נפוצה ונובעת מעצם השימוש במכשיר החדש.

זיכרון (סך הכל 30 זיכרונות)

- להצגת זיכרון המדידות הקודמות יש ללחוץ על לחצן הזיכרון mem.
- למחיקת כל הזיכרונות יש להציג את אחד הזיכרונות על ידי לחיצה על mem ולאחר מכן על ידי לחיצה ארוכה על כפתור mem וכפתור ההפעלה הכחול בו זמנית. המכשיר ימחק את כל הזיכרונות במכשיר.